

## Note de service – MAU (N° 2)


**Cher utilisateur / chère utilisatrice de la MAU,**

Il est très important d'inspecter le filtre à air de votre MAU au moins deux fois par an, et même plus souvent si l'environnement est très humide et poussiéreux. Si le filtre à air est sale, nettoyez-le avec un aspirateur. S'il ne peut plus être nettoyé, remplacez-le par un nouveau. Cette procédure est décrite aux pages 17 et 18 du [Manuel d'entretien](#).

Inspectez en même temps la bobine du refroidisseur d'air et vérifiez qu'il ne contient aucune poussière ; sinon, il faudra le nettoyer à l'aspirateur ou l'essuyer avec un chiffon humide. Lors du nettoyage, faites attention de ne pas tordre les ailettes en métal.

***Si vous n'effectuez pas de telles vérifications et ne suivez pas de telles procédures de nettoyage, les niveaux d'oxygène du concentrateur seront plus faibles, et il risquerait de surchauffer.***

L'illustration ci-dessous, à gauche, montre un filtre sale (en haut) et un filtre propre (en bas). L'illustration ci-dessous, à droite, montre une bobine de refroidisseur d'air (en haut) et la même bobine après avoir été nettoyée (en bas).

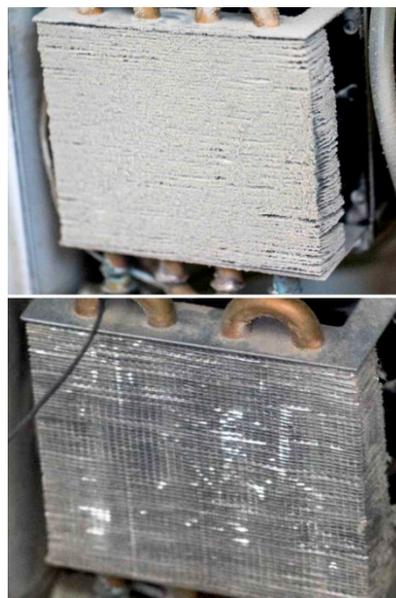

Nous vous remercions pour votre confiance ; n'hésitez pas à nous contacter en cas de questions.

Bien à vous,  
*Ismael Cordero, directeur des services biomédicaux,  
et l'équipe Gadian*