

Checklist à consulter avant l'utilisation du CCV

Vérifiez la configuration

- Vérifiez la stabilité du CCV sur son support et assurez-vous que les freins sont verrouillés
- Effectuez une vérification visuelle du CCV et assurez-vous qu'il est propre
- Vérifiez que la batterie externe reçoit l'alimentation du secteur et vérifiez le niveau de charge
- Vérifiez que la batterie interne reçoit l'alimentation du secteur et vérifiez le niveau de charge
- Vérifiez que le filtre d'entrée d'air est présent et propre
- Vérifiez la disponibilité du ou des gaz comprimés, y compris une source d'oxygène de secours
- Vérifiez la disponibilité de l'humidification et de la filtration bactérienne
- Vérifiez que le circuit respiratoire et le clapet antiretour d'expiration sont correctement assemblés

Vérifiez l'alarme

- Mettez le CCV en marche et raccordez-le à un poumon de test
- Vérifiez que le ventilateur délivre du gaz
- Vérifiez le fonctionnement de l'alarme Low O₂ Source (Source d'O₂ faible)
- Vérifiez le fonctionnement des alarmes Low and High Airway Pressure (Pression voies faible et élevée)
- Vérifiez qu'aucune alarme n'est active